
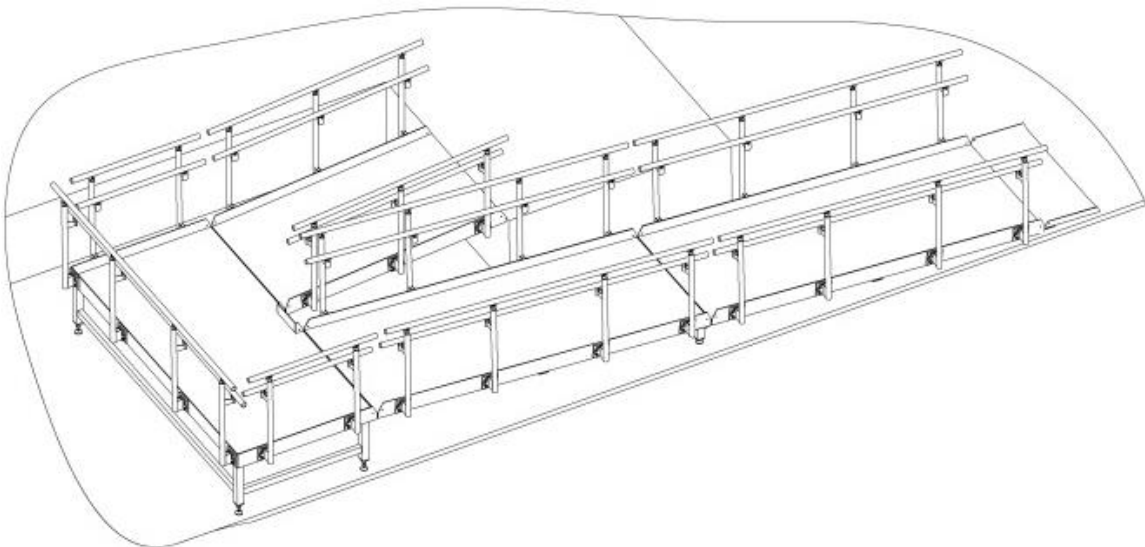


# Montageanleitung

## Modulsystem Reha-Laufsteg

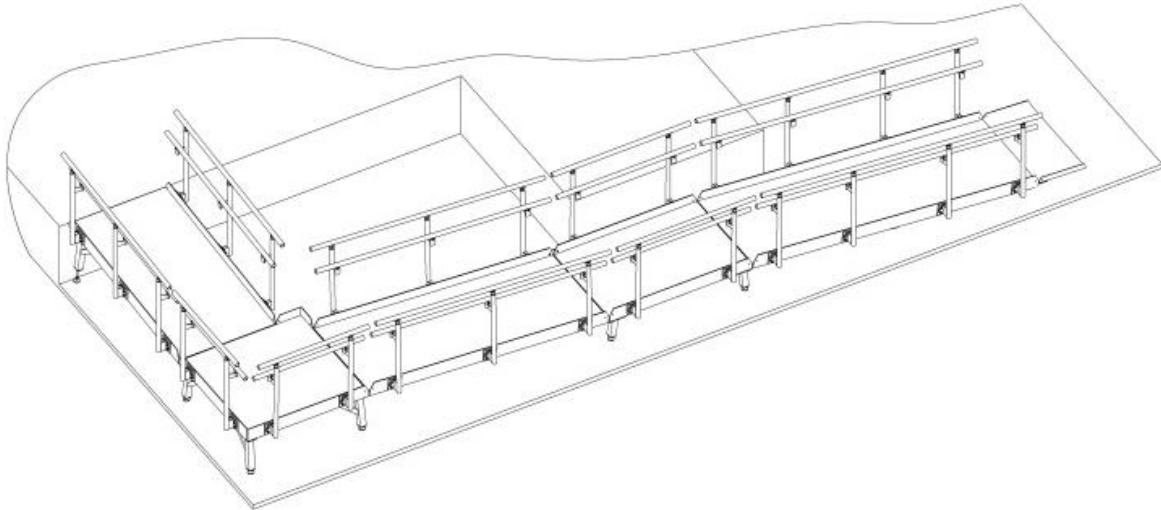


### Werkzeuge:

- Gabelschlüssel SW13, SW15, SW17, SW30
- Imbusschlüssel Nr. 5


### 1. FüÙe anschrauben

- 4 FüÙe für Podeste
- 2 FüÙe für Rampen

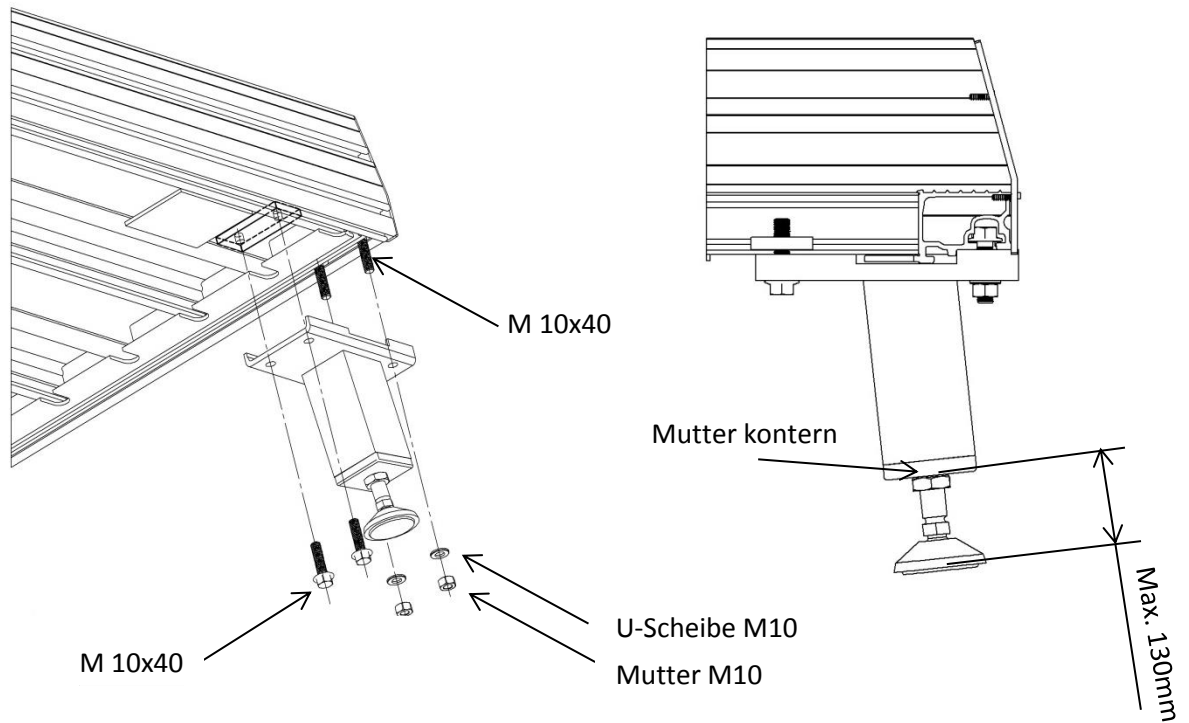


Bei unbefestigtem Untergrund (Rasen, Kies, etc.) muss eine Betonplatte unter die FüÙe gelegt werden.

### 2. Bei langen FüÙen ( ab HD = 465 ), Querstrebe anbringen. Querstrebe wird mit der Mutter vom Gelenkfuß angezogen

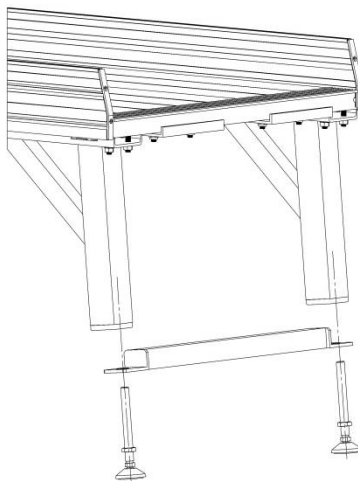


### 3. Einhängehaken zwischen die Füße schrauben


- Bei Breite = 800 / 1000 => 2 Einhängehaken
- Ab Breite = 1200 => 3 Einhängehaken

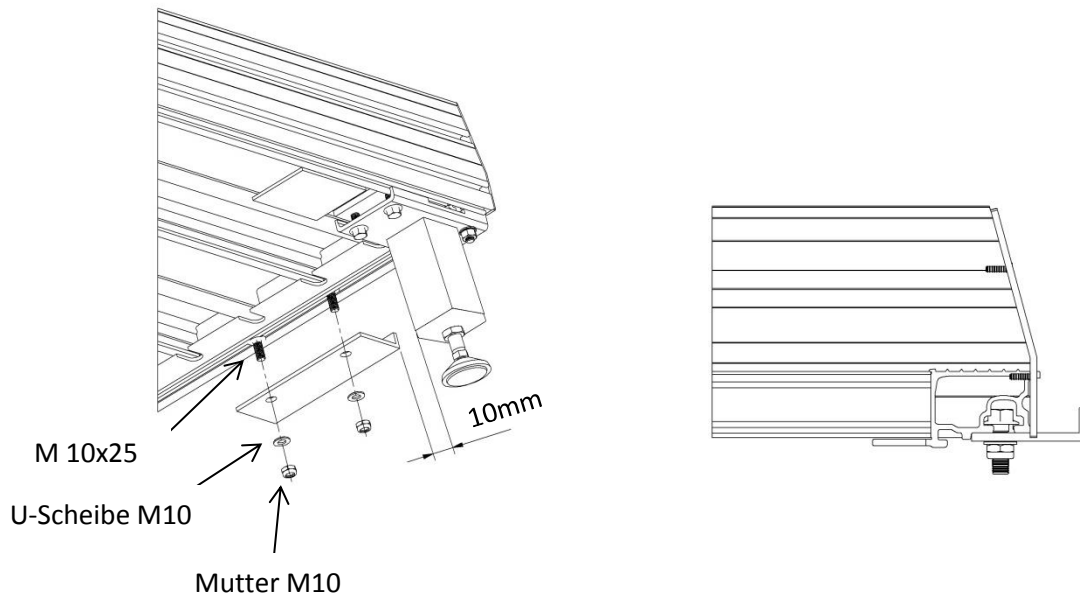


- ### 4. Oberstes Rampenelement (oder Podest) an den gewünschten Platz stellen und die darauf folgenden Rampenelemente in die Einhängehaken hängen. **Bei der Montage immer von oben beginnen.** Die Rampenelemente müssen von Anfang an gut ausgerichtet werden.

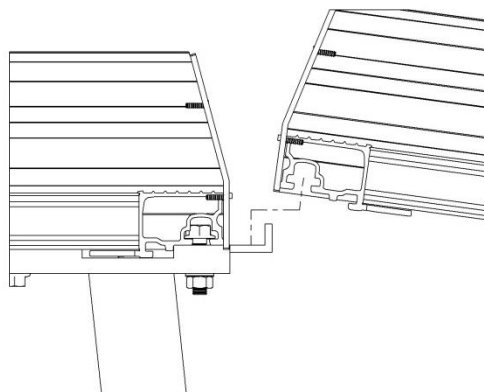

5. Verbindungslaschen seitlich anschrauben

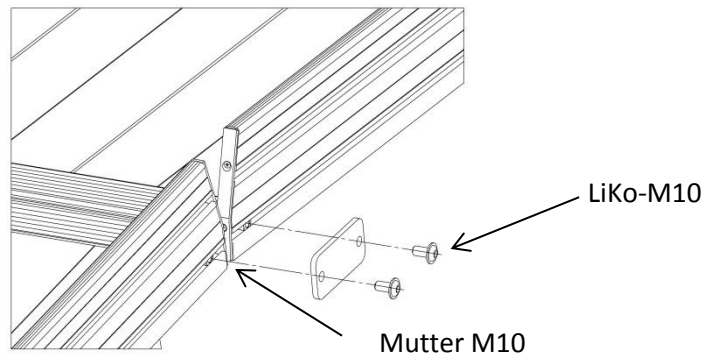

6. Geländerpfosten und Handläufe montieren (Pfosten können um + 13° und -13° geneigt werden)

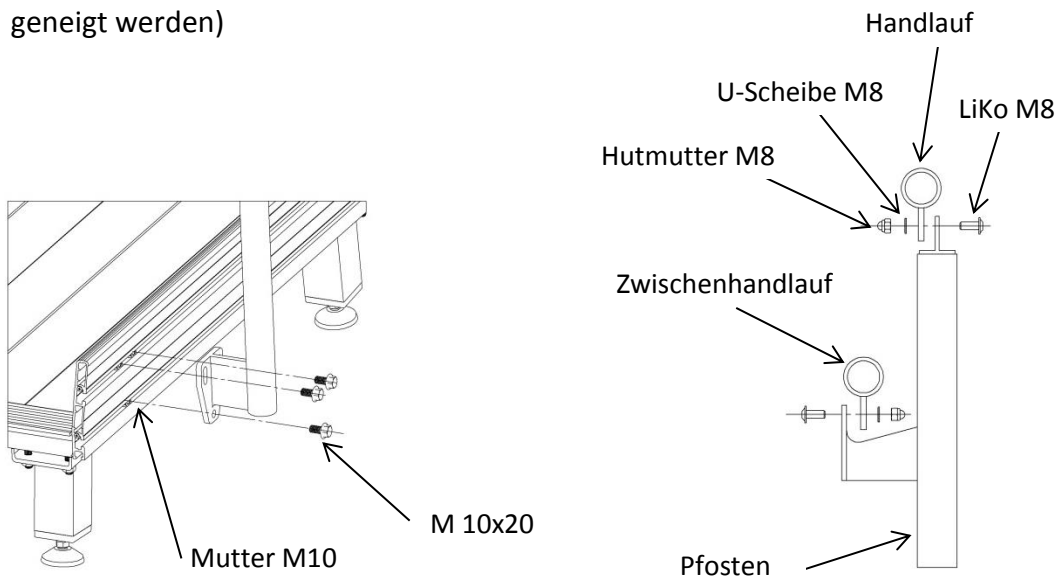

7. Auffahrblech am letzten Rampenelement anschlagen und mit den Verbindungslaschen fixieren. (siehe Punkt 5)

